

SCREEN

ALCOL TEST

Digitale

Prima di utilizzare lo strumento leggere attentamente le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI.

Prodotto non destinato a scopo Medico o Diagnostico

AVVERTENZE

L'etilometro rileva la presenza di alcool nell'espirsto ed i risultati prodotti devono ritenersi solo indicativi della presenza di alcool nel sangue. Ogni individuo reagisce in modo differente al consumo di alcool e pertanto i risultati del dispositivo saranno diversi per ognuno. Essi pertanto non devono essere utilizzati quale prova del valore rilevato ai fini legali, in quanto al massimo solo indicativi della circostanza che si sia a rischio nella guida. La rilevazione effettuata dal presente apparecchio non garantisce la perfetta corrispondenza con quella eventualmente accertata dalla Pubblica Autorità a mezzo di proprie apparecchiature, né assicura l'effettivo rispetto dei limiti del valore corrispondente al tasso alcolemico richiesti dalla legge al guidatore del veicolo a motore. La società produttrice e distributrice del presente prodotto non è responsabile per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio del dispositivo.

DISPLAY



MESSAGGI DI ERRORE

1. "FFF", significa che il campione d'aria non è sufficiente, soffiare con più forza e con un'intensità costante
2. Il conto alla rovescia comincia da "3" secondi, indica che le batterie sono esaurite, provvedere alla sostituzione

PROCEDIMENTO DEL TEST

1. Premere il tasto di accensione; l'apparecchio emette un "BIP" e sul display inizierà il conto alla rovescia da "10" fino a "0", contemporaneamente rimane accesa la dicitura "WAIT".
2. Terminato il conto alla rovescia si sente un altro "BIP", sul display compare contemporaneamente la "C" lampeggiante e "BLOW", cominciare a soffiare direttamente nelle feritoie, per circa 5/6 secondi finché non si sentirà un altro "BIP", soffiare sulle fessure tenendo l'apparecchio quasi a contatto con la bocca
3. Il risultato appare in cifre sul display e rimane visualizzato per circa 8 secondi
4. L'etilometro si spegne automaticamente

GRAFICA DELLA CONCENTRAZIONE DELL'ALCOL



Sensore	a Semiconduttore
Intervallo di Misurazione	da 0,00 a 2,00 gr/l
Margine di Errore	± 15%
Soglia di Allarme	0,50 gr/l
Tempo di preparazione/riscaldamento	< 10 secondi (tempo iniziale 18 sec)
Tempo di misurazione / rilevazione	< 8 secondi
Display	LCD retroilluminato
Alimentazione	2 pile mini stilo AAA, incluse nella confezione
Temperatura di utilizzo	-10°C +50°C
Dimensioni	90mm x 30 mm x 16 mm
Peso	45 grammi (pile incluse)

PRECAUZIONI

1. Inserire le pile incluse nella confezione facendo particolare attenzione a rispettare la polarità, altrimenti potreste danneggiare l'apparecchio
2. Per ottenere un risultato accurato, non soffiare fumo o altro gas nella fessura di entrata. Tenere l'unità al riparo dal contatto con liquidi e in luogo fresco ed asciutto. Non pulire con detergenti che potrebbero disturbarne il funzionamento
3. Alla prima accensione o dopo un lungo periodo di inattività, effettuare almeno due volte il Test a vuoto.
4. Quando l'indicatore delle batterie lampeggia il risultato potrebbe non essere corretto, sostituire le batterie al più presto
5. Dopo avere fumato o bevuto attendere minimo 10 minuti prima di effettuare il test
6. L'etilometro determina il livello di concentrazione di alcol nel sangue nel momento in cui viene fatto il test. Per poter misurare effettivamente il livello massimo di alcol nel sangue, occorre attendere circa 45 minuti dall'ultima assunzione di bevande alcoliche
7. L'etilometro è strettamente personale, non deve essere utilizzato per gioco da più soggetti, l'uso consecutivo e intensivo da più soggetti potrebbe falsare il Test
8. Per un test corretto soffiare sempre con la stessa intensità e distanza (2-3 mm max).
9. È opportuno eseguire sempre una seconda misurazione a distanza di circa 10 minuti una dall'altra e valutare i due risultati:
 - **Se i valori sono in crescita:** è probabile che il tasso alcolico potrebbe aumentare ancora poiché non tutto l'alcol è stato assorbito dal sangue
 - **Se i valori sono in forte diminuzione:** è probabile che l'etilometro ha rilevato dell'alcol in bocca, ricordarsi di attendere almeno 10 minuti dopo aver bevuto
 - **Se i valori sono costanti o in leggera diminuzione:** i test sono corretti, l'organismo sta smaltendo l'alcol, i tempi di smaltimento variano da persona a persona

IMPORTANTE – Rilevando un tasso alcolemico prossimo al limite di legge è opportuno tener presente che gli errori dello strumento, unitamente ad imprecisioni nel rilevamento, sconsigliano di mettersi alla guida di un veicolo, fintanto che la lettura non dia sufficienti margini di sicurezza.

IL MANCATO RISPETTO DELLE PRECAUZIONI OLTRE A NON FORNIRE UN TEST ATTENDIBILE, PORTERA' AD UN ESAURIMENTO ANTICIPATO DEL SENSORE.

Importato e distribuito da:
Screen Pharma Srls
Via Settevalli, 448 - 06129
Perugia - Italia
www.screenpharma.it